

TAP[®]-käyttöohje



CE



SCHEU-DENTAL GmbH
www.scheu-dental.com

Am Burgberg 20
58642 Iserlohn, Germany

SCHEU
Dental Technology


TAP®-KOJE

TAP-koje koostuu kahdesta osasta: yläleuan kisko ja alaleuan kisko. Koukkumekanismi yhdistää nämä kiskot. Koje ohjaa alaleukaa eteenpäin, jotta unen aikana rentoutuneet kurkun alueen pehmytkudokset eivät tukki hengitysteitä.


TAP-koje (The Thornton Adjustable Positioner) on valmistettu thermoplastisesta muovista, titaniummista ja nikkelittömästä kobolttikromiseoksesta.

www.tap-splint.eu

TAP®-T

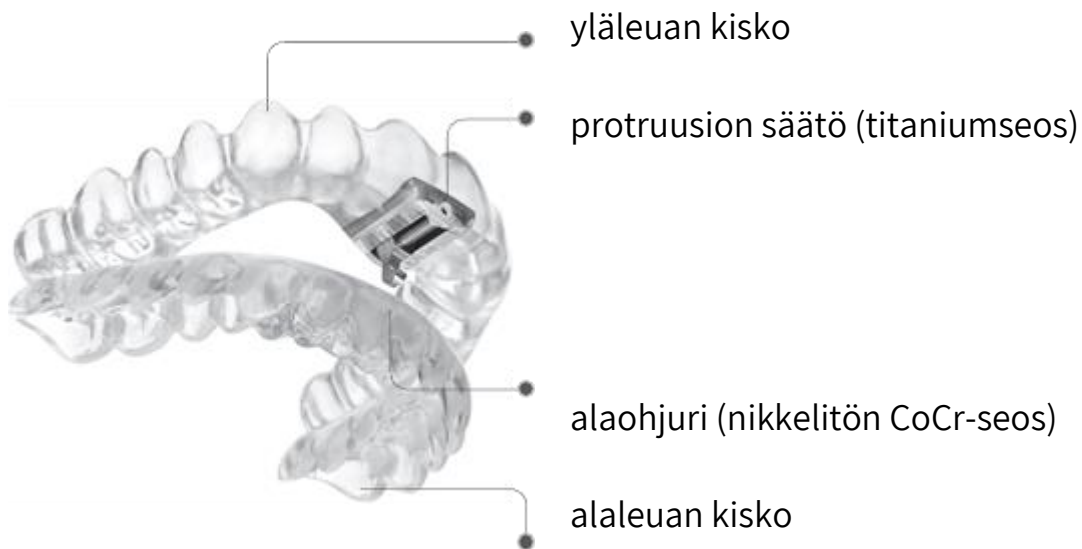

TAP®-T Reverse

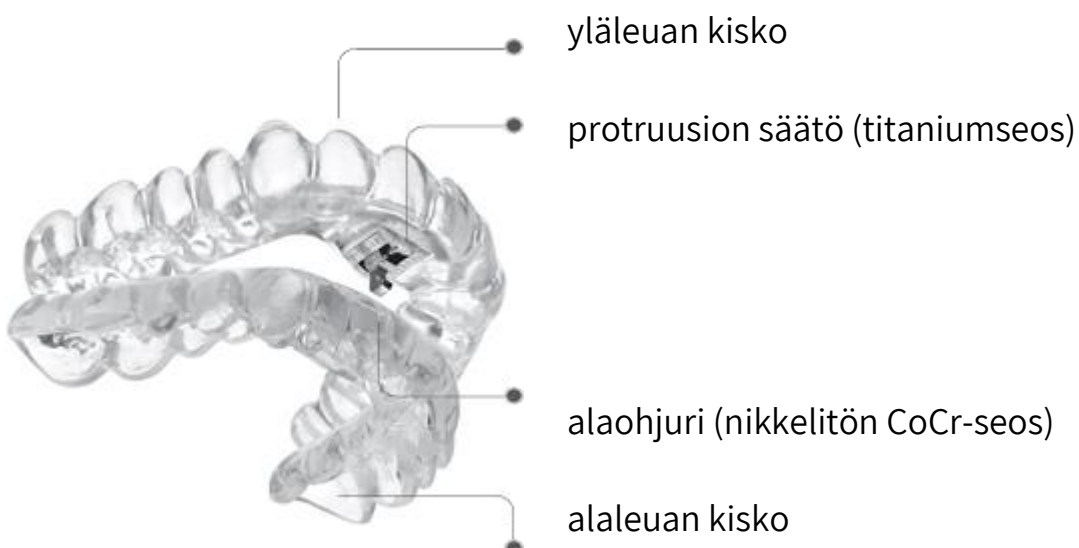

HUOMIOITAVAA

TAP-koje voi tuntua aluksi epämukavalta suussa. Olon pitäisi helpottua tunnin aikana. Jos epämukavat oireet jatkuvat yli neljä tuntia, ole yhteydessä TAP-kojeen määränneeseen lääkäriin.

Varaa kontrolliaika hammaslääkäriltäsi tarvittaessa ja vähintään vuosittain, jota hän voi tarkistaa TAP-kojeen kunnon ja toimivuuden sinulle.

MAHDOLLISIA HAITTAVAIKUTUKSIA

Seuraavia haittavaikutuksia saattaa esiintyä käytettäessä TAP-kojetta:

- Pientä arkuutta tai epämukavuuden tunnetta hampaissa ja ikenissä napakasti istuvasta kojeesta.
- Ylimääräistä syljen eritystä alkuun. Tämä vaiva helpottaa, kunhan kojeeseen tottuu.
- Lievää leukojen arkuutta tai kireyttä aluksi ja säätöjen jälkeen.
- Väliaikainen purennan muutos. Tämä häviää noin tunnin kuluttua siitä, kun TAP® otetaan aamulla pois suusta ja käytetään purennanharjoittajaa (ks. alla) (esim. Occlusion trainer, AM aligner).
- Leukanivelkipua
- Melko harvinaisesti esiintyy TAP®-laitteen pitkäaikaisen käytön jälkeen hampaiden asentomuutoksia tai muutoksia purennassa.

Tämä laite ei sovi henkilöille, joilla on heiluvia hampaita, hammasproteesit tai muuten sellainen tila, johon irtokojeen pitäminen voisi vaikuttaa haitallisesti. Ota yhteyttä hammaslääkäriin, jos hampaistossasi tai suun terveydessäsi tapahtuu muutoksia.




Occlusion trainer




AM Aligner

KÄYTTÖOHJE

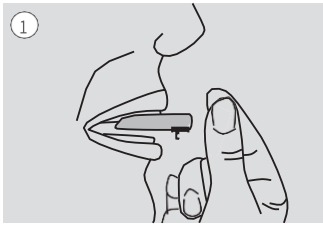


Tarkista TAP-koje ennen käyttöä. Ota yhteyttä lääkäriin, jos havaitset materiaalien irtoavan toisistaan, materiaalin heikkenemistä tai halkeamia.


1. Aseta yläleuan kisko ensin paikalleen.

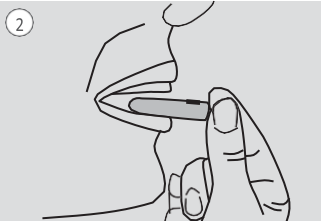

2. Laita alaleuan kisko paikalleen.

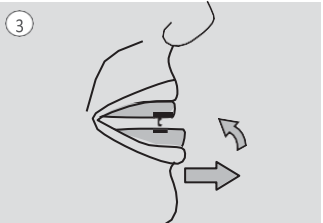

3. Sen jälkeen työnnä alaleukaasi varovaisesti eteenpäin, jotta kojeen koukku sujahtaa paikalleen ja yhdistää molemmat kiskot.

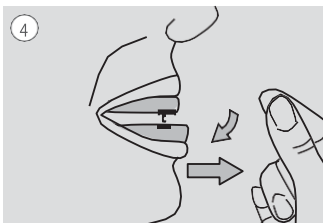

4. Samaan tapaan voit irrottaa kiskot toisistaan. Tuo alemmaa kiskoa hiukan eteenpäin, kunnes koukku irtoaa. Sen jälkeen voit poistaa kiskot suusta.

5. Liikuttele alaleukaa varovasti sivusuuntaan vasemmalta oikealle.

Vinkki: Voit myös yhdistää kiskot ennen suuhun laittamista. Kojeen voi myös poistaa suusta irrottamatta ylä- ja alaleuan kiskoja toisistaan.

KOJEEN SÄÄTÄMINEN

TAP®-T

TAP-kojeen säätö tulee tehdä vain lääkärin hyväksynnällä. Huom! Ohje on kirjoitettu TAP-kojetta käyttävän henkilön näkökulmasta, kun TAP-koje on hänen suussa.



1. Jos haluat tuoda alaleukaa eteenpäin, käännä säätöavainta vastapäivään (vasemmalle korvalle)
2. Kun haluat palauttaa alaleuan alkiasentoon, käännä säätöavainta myötäpäivään (oikealle korvalle)

Yksi 360 ° kierros on 0,5 mm.

TAP®-T Reverse

Malliversiossa TAP-T Reverse aktivointi suoraan suussa ei ole mahdollista. TAP-T Reversen kuusiokoloavainavaimen aktivointirei'itys ei sijaitse etupuolella, kuten TAP-T -versiossa, vaan toisella puolella, vastapäätä koukkua.

Jos ylempi säätölaite vaatii säätöä (+/-), se voidaan tehdä ja tarkistaa helposti asteikon avulla.

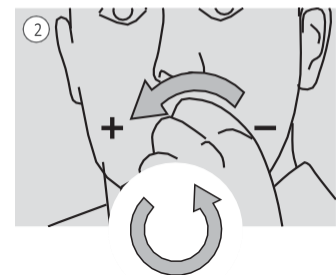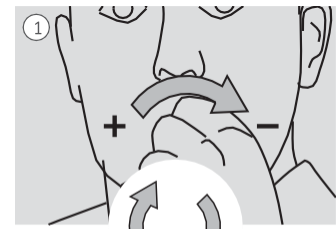

HOITO-OHJEET

TAP-kisko pitää puhdistaa joka aamu huolellisesti pehmeätä hammasharjaa, kylmää vettä ja antibakteerista nestemäistä pesuainetta käyttäen. Ei saa käyttää kuumaa vettä. Kisko huuhdellaan ja annetaan kuivua kokonaan ennen säilytyskoteloon laittamista. Kiskoa ei säilytetä märkänä. Kotelon kannen voi jättää auki, jos kisko ei ole täysin kuivunut.

TAP-kisko huuhdellaan ennen käyttöä. Hampaat pitää harjata ja hammasvälit puhdistetaan ennen kuin koje laitetaan suuhun.

Voit desinfioida TAP-kojeesi kerran kahdessa viikossa seoksessa, jossa on ei-alkoholipohjaista suuvettä ja vettä (1/1 suhde). Liota TAP-kojetta siinä enintään 10-15 minuuttia. Huuhtelee vedellä ennen käyttöä.

TAP-kojeesi koostuu korkealaatuisesta thermoplastisesta muovista. Materiaali ei kestä kuumaa höyryä, kuumaa vettä ja ultraäänipuhdistusta. Älä säilytä TAP-kojetta yli 70 ° C lämpötilassa, sillä kisko voi vahingoittua lämpötilan vaikutuksesta.

Vahvat aromaattiset elintarvikkeet ja juomat, kuten nikotiini, kahvi, tee ja kola-juomat saattavat aiheuttaa pehmeän kiskomateriaalin värjäntymisen. Siksi on suositeltavaa juoda vain kirkasta vettä, kun käytät kojetta. Varmista lisäksi, ettei kojeen puhdistamiseen käytetä orgaanisia liuottimia, kuten alifaattista alkoholia, toluenia, etanolia, asetonia jne. Värjäntymiä voi myös tulla myös mm. amalgaamipaikoista ja hammasproteesin metalliosista.